

Gebruik

- 1 Vang wat ochtendurine op in een beker
- 2 Hou de teststrip ongeveer één seconde in de urine
- 3 Haal de strip uit de urine en schud het vocht eraf
- 4 Het deel van de teststrip dat in de urine is geweest verandert van kleur
- 5 Vergelijk de kleur van de strip met de schaal aan de binnenzijde
- 6 Lees de waarde af bij de kleur die het meest in de buurt komt

VITAKRUID®

PH Teststrips



VITAKRUID®

PH Teststrips



PH Teststrips

pH graad 5.6 - 8.0

88 STRIPS

PH TESTSTRIPS ZIJN SAMENGESTELD DOOR:

VITAKRUID BV
JACOBUS SPIJKERDREEF 430
2132 XX HOOFDDORP

KLANTENSERVICE:
T 0252 534883
VITAKRUID.NL

Ten minste houdbaar tot einde & batch nummer



5.6



5.9



6.2



6.5



6.8



7.0



7.2



7.4



7.7



8.0

Let op!

Na verloop van tijd kunnen de teststrips verkleuren.

Dit heeft geen nadelig effect op het eindresultaat.

Na gebruik kunnen de teststrips bij het restafval.

Bij voorkeur het testresultaat bespreken

met een zorgverlener.